

SYSTEME WL

Conseil d'utilisation du Système WL

Option 1 :

Nettoyage et désinfection manuels

Etape 1 :

Nettoyage et désinfection externe à l'aide d'une lingette (**MinutenWipes**)

Etape 2 :

Nettoyage interne avec **WL-Clean**
Temps d'action 1 à 2 min.

Etape 3 :

Désinfection interne à l'aide du **WL-Cid**
Temps d'action 2 min.

Etape 4 :

Séchage avec **WL-Dry** ou **WL-Blow**

Etape 5 :

Lubrification

Passage au DAC (cycle long, instruments emballés) ou à l'autoclave classe B (instruments emballés)

Option 2 :

Nettoyage manuel combiné à une désinfection au DAC (*cycle court*)

Etape 1 :

Nettoyage et désinfection externe à l'aide d'une lingette (**MinutenWipes**)

Etape 2 :

Nettoyage interne avec **WL-Clean**
Temps d'action 1 à 2 min.

Etape 3 :

Séchage avec **WL-Dry** ou **WL-Blow**

Etape 4 :

passage au DAC cycle court (désinfection et **lubrification**)

C'est le premier système complet manuel de nettoyage et de désinfection des PID. **Après utilisation du système WL appliquer le lubrifiant.**

