



F360[®]. 1ère solution universelle de préparation canalaire.

Préparation mécanisée de tous vos canaux avec 1 seul instrument.



Dispositif médical : Classe IIa
Organisme notifié : TÜV Rheinland (0197)
Fabricant : Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Pour toute information complémentaire
se référer à la notice d'utilisation.

www.komet.fr



1ère solution universelle de préparation canalaire.



- **Un seul instrument**
pour la préparation de tous
vos canaux (25/100ème, 4 %)
- **Sur votre moteur**
(ou C.A.) endo habituel
- **Grande flexibilité**
pour une meilleure adaptation
aux différentes morphologies
canales

Utilisation appropriée des limes F360.

Avant d'utiliser les limes F360, l'utilisation d'un opener (ex. AlphaKite Opener) est recommandée pour élargir l'accès au canal. La perméabilité du canal doit avoir été préalablement vérifiée au moyen d'une lime manuelle (par ex. K15).

Les F360 sont à utiliser en rotation continue jusqu'à la longueur de travail dans un mouvement de „picking“ (va et vient) de manière à être continuellement en mouvement dans le canal.

Après le passage de l'instrument, l'opérateur a le choix, selon sa technique, soit d'obturer directement (ex. pâte-cone), soit d'élargir sa préparation au moyen de son instrument de finition habituel (par ex. 25/100ème, 6 %)

1 patient = 1 lime

F360

existe dans les tailles 25, 35, 45 et 55
en longueurs 21, 25 et 31.

F04L21/25/31.204.025/035/045/055

opt. 250-350 min⁻¹
Torque: 1,8 Ncm

STERILE R



Quality Products
Made in Germany